

VisuXL

SOLUZIONE OFTALMICA

Quando si dovrebbe usare VISUXL?

VISUXL è una soluzione oftalmica lubrificante e antiossidante senza conservanti a base di Coenzima Q10, Vitamina E TPGS e Acido ialuronico sale sodico Cross-Linkato.

L'Acido ialuronico Cross-Linkato è una forma di Acido ialuronico più stabile ed efficace rispetto alla forma non stabilizzata che conferisce a VISUXL migliori proprietà viscoelastiche, mucomimetiche e idratanti ed una efficacia maggiore nel tempo.

La combinazione di Acido ialuronico Cross-Linkato e sostanze antiossidanti/antiradicali permette un trattamento più efficace nei casi di:

- secchezza oculare;
- alterazioni della continuità della superficie corneale e congiuntivale dopo chirurgia refrattiva, trauma da corpo estraneo e interventi chirurgici;
- alterazioni della superficie oculare legate a patologie metaboliche (diabete);
- stress ambientale (smog, acqua clorata, microclimi alterati, fumo, aria condizionata);
- intensa e prolungata esposizione a radiazioni UV e ionizzanti;
- uso prolungato di computer, videoterminali, televisione.

Modalità d'uso

Instillare 1-2 gocce di VISUXL nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista.

Come si applica VISUXL

Rimuovere il tappo. Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale di ciascun occhio tirando la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo leggermente il flacone. Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore. La soluzione può essere riutilizzata entro 2 mesi dopo la prima apertura.

Quali altre indicazioni devono essere rispettate ai fini dell'applicazione?

In caso di terapie concomitanti, instillare VISUXL almeno 5 minuti dopo la somministrazione di altri medicinali.

Avvertenze

- Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti;
- Nel caso di comparsa di reazioni avverse sospendere l'uso, rivolgendosi al proprio oculista;
- Il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto: non ne altera le caratteristiche, può eventualmente contribuire all'idratazione delle lenti a contatto morbide;
- Instillare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo l'utilizzo di altri farmaci;
- Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 60 giorni dalla prima apertura del flacone;
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Lavare le mani prima di applicare il prodotto;
- Non toccare gli occhi con la punta del flacone;
- Non usare il flacone se danneggiato;
- Conservare il prodotto lontano da fonti di luce, di calore e dalla portata dei bambini.

Composizione

100 ml di VISUXL contengono:

- Coenzima Q10 100 mg;
- Vitamina E TPGS (D- α -tocoferil polietilenglicole 1000 succinato) 500 mg;
- Acido ialuronico sale sodico Cross-Linkato 100 mg;
- Soluzione Isotonica tamponata q.b. a ml 100.

CONFEZIONE

Flacone da 10 ml senza conservanti in Sistema-3K

FABBRICANTE

Visufarma SpA, Via Canino 21, 00191 Roma



STERILE A