

Per un sollievo dell'occhio secco immediato e di lunga durata, ripristina la qualità della lacrima

Visuevo®

SOLUZIONE OFTALMICA

Visuevo® è una nuova formulazione innovativa a base di acidi grassi essenziali omega-3, Vitamine A e D e fosfolipidi ultrafiltrati.

Visuevo® riduce l'eccessiva evaporazione del film lacrimale indotta da stati infiammatori della superficie oculare grazie alla presenza dei liposomi (fosfolipidi), Omega-3 e Vitamina D.

La Vitamina A ed i fosfolipidi sono costituenti naturali del film lacrimale e grazie alla loro azione antiossidante prevengono i danni indotti dalle specie reattive dell'ossigeno, favorendo l'omeostasi ed il contenimento del film lacrimale, nonché il controllo della sua evaporazione.

Omega-3, Vitamina D e Fosfolipidi migliorano l'osmolarità del film lacrimale preservandolo da stati infiammatori indotti da un'eccessiva evaporazione.

Grazie alla sua formulazione, Visuevo® è indicato:

- In tutte le forme di secchezza oculare evaporativa per aumentare la stabilità dello strato lipidico, riducendo l'evaporazione della fase acquosa del film lacrimale, (dovuta ad esempio da uso prolungato computer, lettura, guida, uso di medicinali, allergie oculari, lenti a contatto);
- come pretrattamento alla chirurgia oculare al fine di ottenere un miglior risultato in termini di recupero dell'integrità lipidica della superficie oculare;

- nelle forme di secchezza oculare dovute ad una ridotta secrezione lipidica delle ghiandole di Meibomio;

- nei casi di secchezza oculare dovuti da deficit di mucina;

- nei casi di peggioramento della secchezza oculare indotta dall'uso di colliri conservati.

MODALITÀ D'USO:

Instillare 1 goccia di Visuevo® nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 3 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista.

COME SI APPLICA VISUEVO®:



Tenere il flacone direttamente sotto il tappo e ruoti il tappo per aprire il flacone.



Instillare 1 goccia nel sacco congiuntivale di ciascun occhio tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo leggermente il flacone;



Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: la soluzione può essere riutilizzata entro 60 giorni dopo la prima apertura.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Nel caso faccia un uso concomitante di altri colliri, è consigliabile instillare Visuevo® attendendo almeno 10 minuti tra le somministrazioni di altri medicinali.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti;
- Nel caso di comparsa di reazioni avverse sospendere l'uso, rivolgendosi al proprio oculista;
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso;
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 60 giorni dalla prima apertura del flacone;
- Lavare le mani prima di applicare il prodotto;
- Non toccare gli occhi con la punta del flacone;
- Non usare il prodotto se danneggiato;
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato;

Fabbricante

Visufarma SpA

Via Alberto Cadlolo, 21 - 00136 Roma

info@visufarma.it

- Conservare il prodotto lontano da fonti di luce, di calore e dalla portata dei bambini.
- Il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto;
- Uso oftalmico, non ingerire;
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente (15-25 °C).

COMPOSIZIONE:

Liposomi da fosfolipidi di soja, olio di alga (DHA+EPA), Vitamina A palmitato, Vitamina D, EDTA disodico, PEG 400, Acido bórico, Sodio tetraborato, soluzione isotonica tamponata pH 7,20.

CONFEZIONE:

Flacone da 10 ml, senza conservanti in Sistema Novelia®.

Flacone da 5 ml, senza conservanti in Sistema Novelia®.

Flacone da 3 ml campione gratuito, senza conservanti in Sistema Novelia®.



**NON DISPERDERE IL PRODOTTO
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

STERILE A

CE 0477