



SOLUZIONE OFTALMICA

DESCRIZIONE

VISUPRIME® è una soluzione oftalmica lubrificante sterile, isotonica e tamponata a pH fisiologico a base di Poloxamer 407, Poliquaternario 133 ed EDTA disodico.

INDICAZIONI E MECCANISMO D'AZIONE

VISUPRIME®, grazie alla presenza del Poloxamer 407, crea una barriera meccanico-fisico protettiva che lubrifica e stabilizza il film lacrimale, riducendo l'evaporazione lacrimale e il rischio di contaminazione microbica. VISUPRIME® è utile nel contrastare i sintomi di discomfort oculare associati a fenomeni infiammatori anche su base infettiva e nel pre e post intervento chirurgico. La presenza infine di un sistema tampone salino aiuta a mantenere il pH ai valori fisiologici, regolando l'osmolarità lacrimale.

MODALITÀ D'USO:

Instillare 1 o 2 gocce di VISUPRIME® 2 volte al giorno nel sacco congiuntivale di ciascun occhio o secondo parere del medico.

COME SI APPLICA VISUPRIME®:

- Rimuovere il tappo di protezione;
- Instillare 1 o 2 gocce nel sacco congiuntivale dell'occhio interessato tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: la soluzione può essere riutilizzata entro 28 giorni dopo la prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti;
- Non usare il flacone se danneggiato o non perfettamente chiuso quando si apre per la prima volta;
- Non è previsto l'uso con le lenti a contatto indossate;
- Instillare il prodotto almeno 10 minuti dopo l'utilizzo di altri medicinali oftalmici;
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;

- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato;
- Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 28 giorni dalla prima apertura del flacone;
- Utilizzare il prodotto entro 28 giorni dalla prima apertura del flacone;
- Lavare le mani prima di applicare il prodotto;
- Non toccare gli occhi o qualsiasi altra superficie con la punta del flacone;
- Chiudere bene il flacone dopo l'utilizzo;
- Conservare il prodotto lontano da fonti di luce, di calore e dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto in frigorifero (2-8 °C).
- Uso oftalmico, non ingerire.
- Il prodotto è destinato all'uso da parte di un singolo paziente.
- Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso.
- L'eccesso di prodotto non utilizzato deve essere smaltito secondo le legislazioni locali.

USO IN SPECIFICHE CATEGORIE DI POPOLAZIONE

Non sono noti gli effetti clinici del prodotto in donne in stato di gravidanza o allattamento e negli individui di età inferiore ai 18 anni. Pertanto, se ne sconsiglia l'uso in queste categorie di popolazione.

EVENTI AVVERSI

- Non sono noti eventi avversi associati all'uso del prodotto.
- In caso di effetti indesiderati interrompa il trattamento e consulti il suo medico

COMPOSIZIONE:

100 ml di VISUPRIME® contengono:

- PQ133 100 mg;
- Poloxamer 407 4500 mg;
- EDTA disodico 100 mg;
- Soluzione isotonica tamponata q.b. a ml 100;

CONFEZIONE:

Flacone da 10 ml;
Flacone da 5 ml;
Flacone da 3 ml campione gratuito.

Fabbrikante

Visufarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21
00136 Roma
info@visufarma.it



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Tenere lontano da fonti di luce



STERILE A



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso

